

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理。

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣板橋市三民路二段正隆巷37號	02-8953-5123

售後服務代理商：峰磊實業有限公司
消費者服務專線：02-8953-5123

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。


陞林股份有限公司

製造商名稱：威立德有限公司 中和廠
許可證字號：衛署醫器製字第002144號
售後服務商：峰磊實業有限公司
服務專線：(02)8953-5123 產地：台灣

kol*in*

歌林經皮神經刺激器
WL-2406

使用説明書

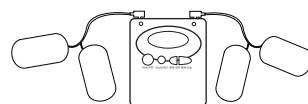

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

產品簡介


經皮神經刺激器經過臨床實驗證明，具有舒緩神經痛、肩膀酸痛，而無藥物治療所可能造成之副作用。

經皮神經刺激法是以微電流通入經皮神經以代替針灸刺激經皮神經之方法，此乃刺激身體內部之最佳方法。

產品特色


可選擇8個預設模式（捶打、自動按摩、揉、捏方式及手、肩、肚、腿等部位）及多種不同速度力度來進行按摩及塑身。適用於：肩部僵硬、促進血液循環、肌肉疼痛等。

主機電擊貼片結合步驟

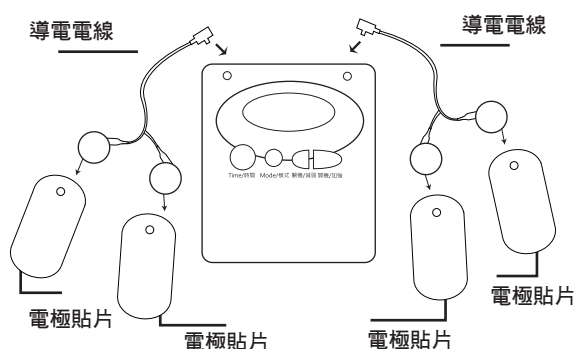

結合步驟：將導電電線的前頭插入主機輸出孔中，末端再與電極貼片相接。

各部說明

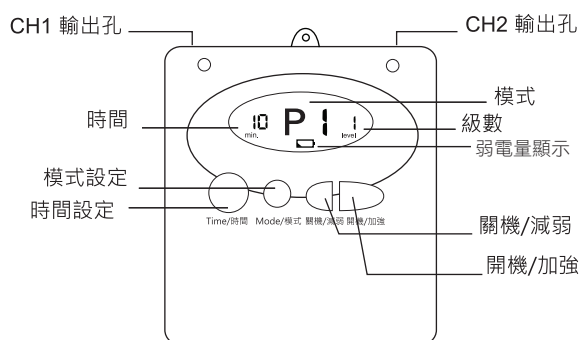

使用説明

準備及安裝

- 1、安裝電池時請按照電池盒中所示的“+”“-”極裝入電池，然後蓋好背後電池蓋。
- 2、正確連接導電電線和電極貼片，並將導電電線另一頭插入主機的输出孔中。(如上頁圖示)
- 3、請擦淨預備貼電極貼片部位的皮膚，以免油污，化妝品及其他污染黏到貼片上。
- 4、剝掉貼片的外層薄膜並將貼片貼到你想要按摩的部位。每組電極貼片都貼好後，主機才能開始操作。千萬不要在電源開著的時候貼電極貼片，否則會受到強烈刺激。
- 5、因皮膚各部位薄厚度不同，敏感程度也不同，第一次使用時，請先嘗試貼於皮膚較厚部位，如大腿或肚子。以免受到刺激。

功能操作

- 1、按電源開關三秒鐘，即可打開電源（請按開機/加強鍵），螢幕會顯現數字。
- 2、先根據您的需要選擇不同功能模式（按MODE/模式鍵），共有8種模式選擇（P1-P8為模擬人體按摩的模式，為針灸、滾動、敲打、揉捏、拍打、指壓、槌打，而P8為全自動循環模式）
- 3、若需選擇時間。請按Time/時間鍵，可依需要選擇10，20，30或60分鐘。不按時為10分鐘，按一下為20分鐘再按一次為30分鐘，再按一次為60分鐘。
- 4、若需選擇速度時。請按（開機/加強）按鍵，可連按數次直到達到所需速度及力度（由1到10級level）。
- 5、需減低速度或力量刺激時，請按（關機/減弱鍵），可連按數次直到達到所需速度及力度。
- 6、當您需停止使用時，請將level調至0級，再按（開機/減弱鍵）三秒鐘直至關閉電源。
- 7、時間：每個部位的標準時間為10-20分鐘，每個部位一次使用最好不要超過30分鐘。
- 8、電量：若電量不足時，螢幕會顯現出電池符號  提醒您更換電池。

注意事項

- 使用本機前，請詳閱“使用說明書”及“安全注意事項”以便正確使用。
 - 若使用不當或無視安全注意事項，有可能發生人身傷害及物品損壞危險。
- 1、不可與下述電子醫療器材同時使用：

- 使用心律調整器或人工心臟及體內埋入型電子醫療器材者。
 - 使用人工心肺博起器及生命延續用電子醫療器材者。
 - 使用心電計等戴著型電子醫療器材者。
- 2、請勿在高溫場所或洗澡時使用。
 - 3、請勿在開車及睡眠時使用。
 - 4、請勿讓嬰幼兒或不能表達自己意志者使用。
 - 5、治療按摩過程中輸出強度調整至舒適即可。
 - 6、具下列症狀者，須經醫師同意後使用，否則將發生不良後果或事故：
 - 急性病患或嚴重感染性疾病的患者。
 - 心臟病患及使用心律調整器者。
 - 血壓異常（180 mm Hg 以上者）或發燒（體溫38℃ / 100°F 以上者）。
 - 貧血及惡性腫瘤患者。
 - 身體特殊異常者及感覺神經異常者。
 - 心臟、頭部、面部、口內、陰部或敏感部位請勿使用。
 - 7、在使用中感到身體不適或皮膚有異常反應時，請立即停止使用。
 - 8、同一部位，建議每次以15分鐘為準，每天以3次為佳。

收藏與維護

一、主機

- 機體嚴禁由高處掉落、重摔、擠壓或浸水。
- 請放置於常溫及乾爽的場所；並禁止使用化學藥劑擦拭或清洗。
- 主機禁止自行拆裝、組合、分解。

二、電極貼片

- 嚴禁兩片電極貼片對黏及相連。貼片必需保持乾淨，勿沾灰塵、油漬及髒物。
- 禁止使用化學藥劑擦拭或清洗。
- 當黏著力降低時，請用濕布輕輕擦拭或以水輕洗貼片表面後，即可恢復黏性。如擦拭清洗後仍無法恢復黏性，建議更換新的黏著貼片，以維持正常運作。
- 電極片壽命：貼片有效期為兩年。
- 電極片屬於消耗品，不在保證內。電極片耗損或不堪使用時，請更換原廠規格之新品或同級品。（如需購買電極片，請洽服務專線02-8953-5123）

刺激模式說明

模式mode	刺激/運動方式
P1	固定頻率與波寬15Hz260us連續性輸出
P2	固定頻率與波寬100Hz260us每秒輸出兩次（斷續波輸出）
P3	固定頻率與波寬120Hz260us連續性輸出
P4	變動頻率與波寬，2Hz260us--120Hz150us（一週期為六秒）
P5	固定頻率與變動波寬，100Hz260us--100Hz150us（一週期為六秒）
P6	變動頻率與固定波寬，7Hz260us--80Hz260us（一週期為六秒）
P7	固定頻率與變動波寬120Hz260us--120Hz150us（一週期為六秒）
P8	循環上列七種模式

簡易故障排除

- 本機如有異常時，請速關閉電源，並與本公司售後服務商聯繫，同時告知故障異常與狀況。
- 本產品經公司完整品保制度下生產組裝。如有故障或異狀，在您送修前請先檢查下列可能發生原因，並自我排除之。

狀況	原因	處理方式
燈號顯示不亮	• 電池未裝入、極性不正確或耗盡 • 開機狀態 重新裝入或換新電池	重新裝入或換新電池 重新開機
燈號有顯示，但無輸出動作產生	• 電池電力不足或未裝妥 • 輸出電源開/強波段鍵設定不當	請再確認或更換電池 請確認
燈號亮度暗淡，或燈號顯示正常，但無輸出功能	• 電池電力不足 • 電極片耗損，有異物 • 電極片貼附位置不當	更換電池 擦拭或更換電極片 重新貼附
燈號顯示正常，但使用中定時時間未到即自動關機	• 電極片耗損、有異物、貼附不當 • 電池電力不足	擦拭或更換電極片 更換電池

規格說明

品名：歌林經皮神經刺激器

型號：WL-2406

電壓：DC3V AAA電池 x 2顆



廢電池請回收

消耗功率：1W

機體重量：33g

機體尺寸：6(W) X 1.5(D) X 6.5 (H) cm